

**SARA STEDY**  
BIPEDESTADOR MEJORADO



## MEJORAMOS EL APOYO A MÁS PACIENTES

Sara Stedy®, un nuevo bipedestador mejorado, se basa en el éxito de Stedy, un sistema de apoyo probado que facilita la movilidad y anima a más pacientes con movilidad a levantarse de forma independiente. Con un gran número de nuevas mejoras, Sara Stedy ayuda a minimizar el manejo manual de los cuidadores en una variedad aún más amplia de circunstancias. Sara Stedy, que ahora ofrece una mayor anchura interior, una nueva forma del asiento y una carga segura aumentada a 182 kg, también responde a las necesidades de los pacientes de contextura más grande. Las nuevas características mejoradas, como el asiento giratorio dividido y las patas para chasis que se accionan por pedales, aseguran un mayor confort y apoyo además de facilitar las prácticas cotidianas a los cuidadores.

### Nuevo diseño del asiento



El innovador asiento giratorio aumenta la eficacia de la transferencia y la estabilidad del paciente.

### Asideros integrados



Los asideros integrados en el asiento permiten al cuidador girar fácilmente el sistema de apoyo.

### Chasis fácil de abrir



Las patas para el chasis accionadas por pedales se ajustan fácilmente para un acceso óptimo durante las transferencias.

### Soporte de rodilla mejorado



Ofrece adicional estabilidad o soporte firme cuando un paciente no puede controlar por completo el movimiento de sus piernas.

### Ruedas con bloqueo total



Las nuevas ruedas de bloqueo total proporcionan total estabilidad cuando el sistema está inmóvil.

### Chasis inferior



Las ruedas más pequeñas y las patas rediseñadas se traducen en un chasis inferior que mejora el acceso.





## UN BIPEDESTADOR VERSÁTIL QUE FACILITA LA TRANSFERENCIA

### Una mejor alternativa a las sillas de ruedas

El concepto de bipedestador mejorado se ha establecido de forma exitosa en un gran número de situaciones de cuidados sanitarios para personas mayores y en centros de asistencia porque:

- ofrece una alternativa adecuada y digna a las sillas de ruedas para los pacientes con movilidad;
- promueve la dignidad y la independencia, ya que es posible la participación óptima en actividades;
- permite un buen contacto visual y tranquilizador entre el cuidador y el paciente, a diferencia de la silla de ruedas;
- sirve como transporte al servicio y al lavabo y facilita otras actividades de la vida cotidiana;

Sara Stedy alienta al paciente a participar por completo en su propia transferencia, mejorando su circulación, respiración, digestión y tono muscular. Cuando el paciente se encuentra en el servicio, se anima a levantarse con ayuda de Sara Stedy. Se promueve de manera activa la independencia y la dignidad del paciente. Cuando es necesario, el cuidador puede ayudar con el arreglo de la ropa de una forma fácil y segura.

## PARA TRANSFERENCIAS RÁPIDAS, FÁCILES Y SEGURAS



Acerque al paciente, abra las mitades del asiento y las patas del chasis y coloque los pies del paciente en la plataforma.




Coloque Sara Stedy; accione los frenos de las ruedas; levante al paciente con ayuda del manillar integrado; gire las mitades del asiento hasta la posición de apoyo.



Desactive los frenos y proceda con el traslado.

# ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO


## Requerimientos de espacio

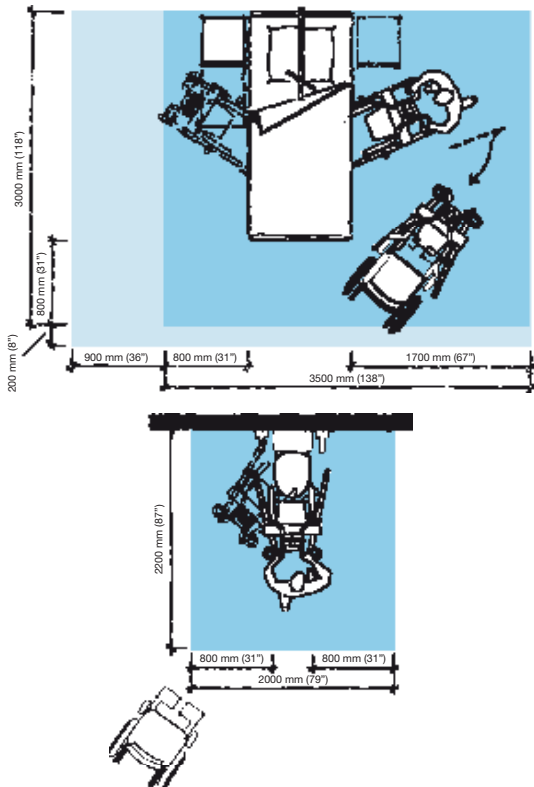

- El área azul indica la superficie de trabajo mínima para que el personal pueda utilizar las ayudas mecánicas de manera ergonómica desde un lado.
- El área azul claro indica la extensión de superficie de trabajo requerida para facilitar las tareas desde cada lado, a fin de ofrecer acceso adecuado para el residente, la ayuda mecánica y el cuidador.

## Mobility Gallery

Adecuado para Albert, Barbara y Carl.

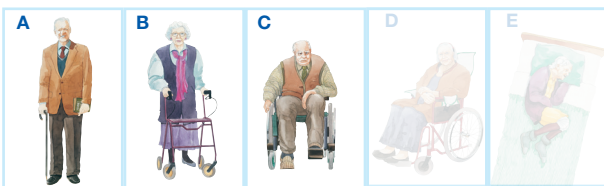

- A Albert**, que es capaz de moverse de modo independiente.
- B Barbara**, que es capaz de sostenerse por sí misma hasta cierto punto.
- C Carl**, que debe sentarse en una silla de ruedas y tiene poca capacidad para sostenerse por sí mismo.

Si desea más información sobre la Mobility Gallery™ (Galería de movilidad), por favor póngase en contacto con ArjoHuntleigh.

# ARJOHUNTLEIGH

## GETINGE GROUP

[www.ArjoHuntleigh.com](http://www.ArjoHuntleigh.com)

ArjoHuntleigh  
PO Box 61  
SE-241 21 Eslöv  
SUECIA  
Teléfono: +46 413 645 00  
Fax: +46 413 645 63

## Información sobre productos

Peso	29,4 kg (64,82 lb)
Máx. carga segura	182 kg (400 lb)
Largo total	905 mm (32 3/4")
Altura total	1051 mm (41 1/2")
Altura del chasis	100 mm (4")
Anchura interna con patas abiertas	729 mm (28 3/4")

Ruedas orientables de baja fricción; las dos traseras con frenos

Grúa – Protección clase IPX4

## Certificaciones

El producto está conforme con la legislación actual y todas las normas de producto aplicables.

En los equipos y productos suministrados por ArjoHuntleigh, solo deberán usarse piezas diseñadas por ArjoHuntleigh destinadas específicamente a ese fin. Debido a nuestra filosofía de desarrollo continuo, nos reservamos el derecho a modificar los diseños y las especificaciones sin previo aviso.

\* y ™ son marcas comerciales pertenecientes al grupo de compañías ArjoHuntleigh.  
© ArjoHuntleigh, 2011.

## Accesorios

Slings y Flites ArjoHuntleigh compatibles (slings desechables).

## Utilización de Sara Stedy

La Mobility Gallery (Galería de movilidad) de ArjoHuntleigh indica de manera general las categorías de movilidad que pueden beneficiarse del empleo de Sara Stedy. Sin embargo, la selección de material de apoyo siempre debe basarse en un asesoramiento clínico personal por parte de un médico, una enfermera titulada, un profesional clínico certificado o similares.

GETINGE GROUP es un proveedor de productos y sistemas líder a nivel mundial, que contribuye a mejorar la calidad y la rentabilidad en el ámbito sanitario y de las ciencias biológicas. Opera bajo tres marcas: ArjoHuntleigh, GETINGE y MAQUET. ArjoHuntleigh se especializa en soluciones para la movilidad de los pacientes y el tratamiento de heridas. GETINGE proporciona soluciones para el control de infecciones en el ámbito sanitario y la prevención de la contaminación en las ciencias biológicas. MAQUET está especializado en soluciones, terapias y productos para intervenciones quirúrgicas y cuidados intensivos.